

CEREC - CAD/CAM FOGORVOSOKNAK

Az elképzeléstől a valóságig.





A CEREC A FOGORVOS KEZE ÜGYÉBE HELYEZI A CAD/CAM RENDSZERT

Helló jövő. Isten hozott a jelenben!

Közvetlen összefüggés van a kifinomult technológia és a vásárló elégedettsége között. Már a néhány adat is bebizonyítja ezt. Az elmúlt 20 évben több, mint 15 millió CEREC pótlást készítettek és helyeztek be világszerte - a páciensek és az orvosok pedig tökéletesen meg voltak elégedve az eredménnyel. Öt év elteltével, a CEREC koronák 95-97 %-a még mindig teljesen ép. Az inlayek és onlayek túlélési rátája 90-95 % 10 év elteltével.

Ma valahol a világon a nap minden másodpercében készítenek CEREC pótlásokat. Régen túlesve a kísérleti technológián, a CEREC egy jól megalapozott és bizonyított klinikai eljárás. A fogászat folyamatosan változik. Mi, a Sironánál alkalmazkodunk ehhez a tudásunkkal és a tapasztalatainkkal - fejlesztésekkel és ötletekkel, amelyek hozzásegítik Önt, hogy leküzdje a modern fogászat kihívásait és növelje megelégedését a munkájával.

A CEREC RENDSZER ELSŐ PILLANTÁSRA

Kifinomult. Tartós. Egyszerű.

Egy motivációs tanulmány szerint - amelyet a Komputerezált Fogászat Német Társasága (German Society for Computerized Dentistry - DGCZ) dolgozott ki - három kulcsfontosságú oka van, hogy a páciensek miért a CEREC kerámia pótlást választják: fémmentesek; fogszínűek; és egyetlen kezelés alatt behelyezhetők. A CEREC-et speciálisan arra fejlesztették ki, hogy a tiszta kerámia pótlásokat egyetlen fogászati kezelés alatt a fogorvosi szék mellett elkészíthessék. A beavatkozások skálája magában foglalja az inlay-eket, onlay-eket, részleges koronákat, a veneereket éppúgy, mint a koronákat, és az ideiglenes hidakat (hátsó és elülső).



A CEREC OPTIKAI LENYOMAT -
GYORS, EGYSZERŰ, PONTOS

Az alapeszme a
bizalomkeltés.

6-9. oldal



A CEREC PROGRAM -
INTUITÍV ÉS BIOGENERIKUS

Egy szoftver, amit
könnyű kezelni.

10-13. oldal



A CEREC CSISZOLÓEGYSÉG -
PONTOS, GYORS ÉS CSENDES

A pótlásokat minta-
szerű pontossággal
készíti el.

14-17. oldal



A CEREC egyesíti a tiszta kerámia anyagok és az egyetlen vízzel járó fogászati kezelés előnyeit, amely nélkülözi a hagyományos lenyomatot és az ideiglenes pótlásokat. A CEREC eljárás tudományos körökben is teljesen elfogadott. A hardvert és a szoftvert folyamatosan fejlesztették a felhasználóbarátság és a költséghatékonyság jegyében. Röviden: a jó minőségű, esztétikus pótlások segítségével növelheti páciensei elégedettségét és erősítheti az Önhöz való ragaszkodásukat.



A CEREC ANYAGOK -
SOKOLDALÚAK ÉS BIOKOMPATIBILISEK

**Minden csiszoláshoz
a megfelelő anyag.**

18-21. oldal



CEREC - ESZTÉTIKA, MELY
MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL

**Az eredmény meg-
különböztethetetlen
a természetes fogtól.**

22-25. oldal



CEREC - KLINIKAI
TANULMÁNYOK

**Tapasztalat,
mely megnöveli
bizalmát.**

26-29. oldal




A CEREC OPTIKAI LENYOMAT – GYORS, EGYSZERŰ, PONTOS


Az alapeszme a bizalomkeltés.

A CEREC eljárás a kezdetektől fogva egyszerű. Megmutatja a páciensnek a hiányt, előkészíti a fogat és egy optikai lenyomatot készít róla néhány másodperc alatt. A könnyen kezelhető CEREC 3D kamera mindig állandó nagyításban mutatja a fogat, függetlenül a javítandó felület és a lencse közti távolságtól. A mező kiterjesztett mélysége együtt jár a borotvaéles képminőséggel. Még egy nehéz inlay preparációt is lehetséges három dimenzióban rögzíteni egy egyszerű exponálással. Hídpótláshoz és/vagy a szomszédos fogakról vett lenyomat készítéséhez vegyen fel több képet, majd rakja egymás mellé egy egyszerű egérekattintással. Még a nehezen látható helyeket is pontosan megmutatja. A preparációs felszín háromdimenziós optikai lenyomata és az antagonista megbízható alapot jelent a pótlás megtervezéséhez.

Egyszerű felvétel készítés.

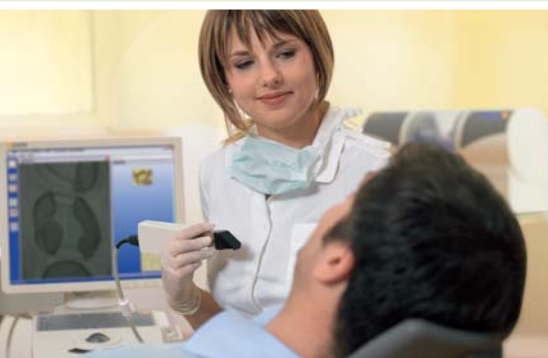

Gyors elemzés.

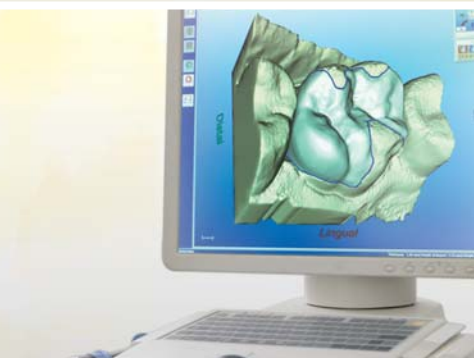

Megbízható tervezés.





A CEREC felvételi egység - Optikai lenyomat az optimális hatékonyságért.

Használatra kész bárhol a fogorvosi rendelő területén:

A CEREC felvételi egység tartalmazza a CEREC 3D kamerát és egy PC-t, amelyet kifejezetten a fogászati pótlások készítéséhez terveztek. A kamerát a közvetlenül a szájüregben készített optikai lenyomatokhoz alakították ki. Az intraorális képek elhagyhatóvá teszik a hagyományos lenyomatokat és az ideiglenes pótlásokat. Ezzel időt takaríthat meg és a páciensek számára vonzóbbá teheti a rendelőjét. Az opcionálisan választható intraorális SIROCAM kamerával és a SIDEXIS digitális röntgen szoftverrel ellátva az Ön CEREC felvételi

egysége egy teljes mértékben felszerelt, fogászati szék melletti kommunikációs rendszerként működik, használatra készen bárhol a fogászati rendelő területén. A képfeldolgozó egység kábel nélkül csatlakozik a CEREC 3 csiszolóegységhez és LAN/WLAN-nal az új CEREC MC XL csiszolóegységhez. Valamint lehetősége van bemutatni a páciensek számára készített tájékoztató videókat CD-n vagy DVD-n. Ez elérhetővé teszi az Ön számára a pácienssel való konzultáció korszerűsítését.

*A CEREC felvételi egység: mobilis és sokoldalú
Tartalmaz egy PC-t, egy FLAT monitort és egy pontos 3D mérő kamerát.*

CEREC Chairline – a lényegre koncentrálva.

A mérő kamera a keze ügyében:

Ha a CEREC Chairline modult választja, közvetlenül beépítheti a CEREC 3D kamerát az M1+, C2+ és a C4+ kezelőegységekbe. Ez maximalizálja a hatékonyságát és az ergonómiát. Mivel a kamera a keze ügyében van, Ön a lényegre koncentrálhat. A páciens úgy érzi, hogy biztonságban és jó kezekben van. Végül, de nem utolsó sorban ez a „minden egyben” konfiguráció értékes helyet szabadít fel/hagy meg a kezelő helyiségben.

A beépített kamerának köszönhetően a CEREC Chairline egyenértékű a tökéletes munkamenettel, a magasszintű ergonómiával, felhasználóbarátsággal, a vonzó és helytakarékos tervezéssel és a hatékony konzultációval.






A CEREC PROGRAM - INTUITÍV ÉS BIOGENERIKUS

Egy szoftver, amit könnyű használni.

A CEREC 3D szoftver 3D-ben jeleníti meg a preparációs modellt, az antagonistákat és a pótlási javaslatokat. Az intuitív felhasználói felületet az őrlőfogakra optimalizálták. Önnek nincs szüksége semmilyen speciális számítógépes ismeretre és ezért teljes mértékben az orvosi munkára figyelhet. A szoftver vezeti Önt - lépésről lépésre -, amíg a pótlás elkészül. Az okkluzális felszínek pontosan úgy néznek ki, mint az eredeti fogak. A CEREC 3D további tervezési lehetőségekkel büszkélkedhet az elülső és hátsó pótlásokhoz. Egy tapasztalt CEREC felhasználó számára megszűnnek a kreativitás határai.

A tökéletes helyrehozatal csapatmunka - az Ön tudása a mi szoftverünkkel együttműködve.

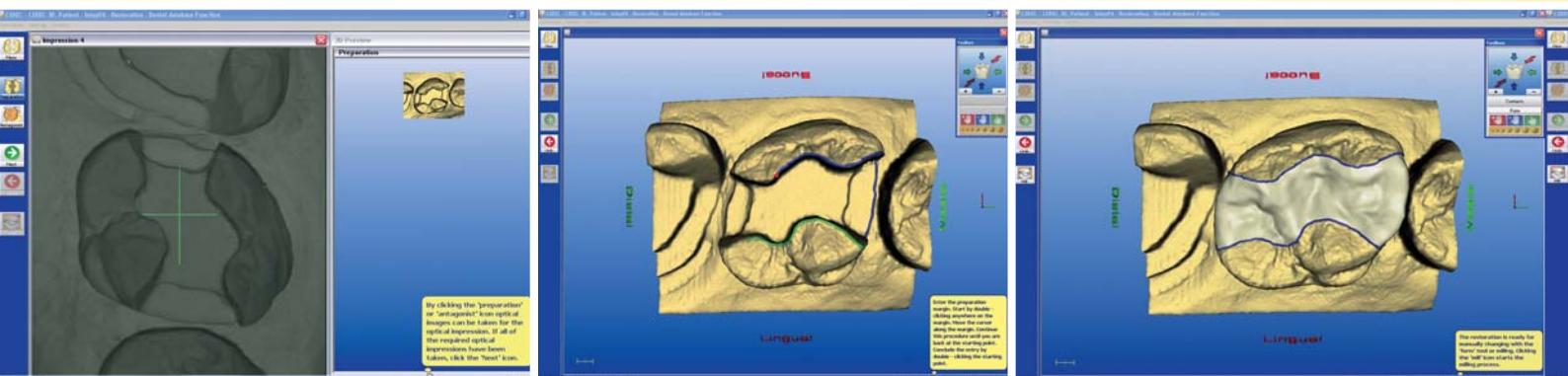

Elkészíti az optikai lenyomatot


Csupán néhány felvétellel megkapja a preparációs felszín optikai lenyomatát, a szomszédos fogakról éppúgy, mint az antagonistáról (feltéve, ha készült harapásminta és/vagy egy FGP). Ebben nagy segítség a célkereszt és az azonnal megjelenő három dimenziós kép.

A szoftver elvégzi a tervezést

Egyszerűen kijelöli a preparációs határokat néhány egérekattintással, majd hagyja, hogy a szoftver elvégezze a többit - automatikusan, mintaszerű pontossággal. A rendszer magától felméri, hogy inlayre, vagy koronára van szükség és elkészíti a megfelelő javaslatot.

Egy „természetesen” kifejlesztett javaslatot kap

A CEREC 3D felajánlja a befejezett pótlást - pontosan illesztett okkluzális és proximális oldallal. Ez a több ezer természetes fogról készített adatbázisnak köszönhető. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a javasolt okkluzális felszín tökéletesen illeszkedik az antagonistákhoz - különösen akkor, ha a fogorvos harapásmintát használt és a CEREC tervezte automatikusan az okkluzális felszínt.

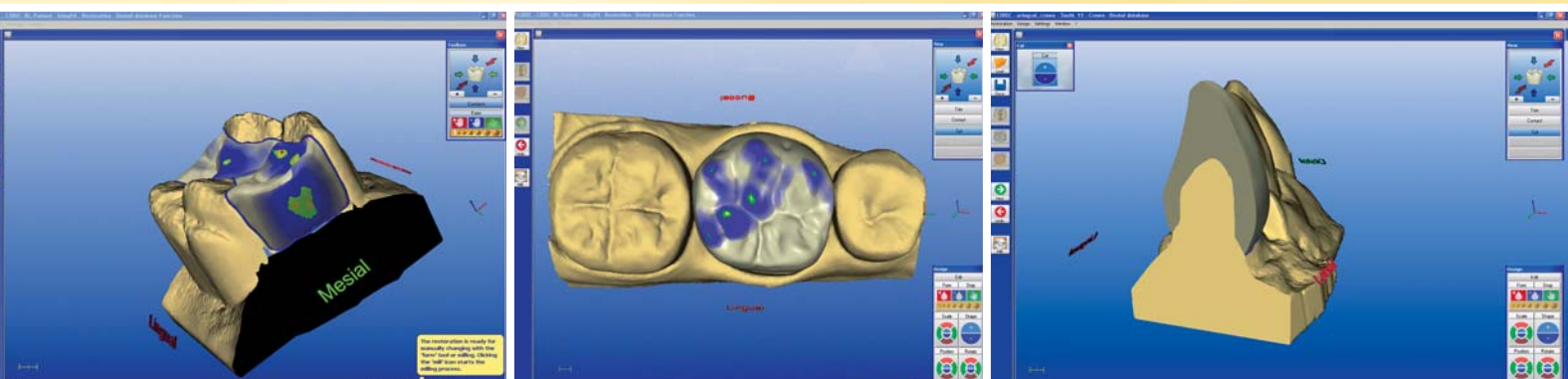

Káprázatos tervezési lehetőségek

Ha kívánja, akár azonnal el is indíthatja a csiszolást - vagy bármit módosíthat a CEREC által tervezett előképpel. Csupán néhány egérgattintással finomíthatja a pótlás felszínét és azonnal megkapja az eredményt. Azután elkezdheti a csiszolást és foglalkozhat a következő páciensével. Néhány perc múlva a kifaragott pótlás készen van és már csak a behelyezésre vár.

Az inlay-ektől a koronákig

Attól függetlenül, hogy inlay-t, onlay-t, részleges vagy teljes koronát szeretne készíteni, az Ön és asszisztense teendői mindig ugyanazok: a fog kiválasztása, az optikai lenyomat elkészítése, a preparációs határok kijelölése, a pótlási javaslat elfogadása, a csiszolás elindítása és végül a pótlás behelyezése.

Mester mód (Master Mode)

A Mester mód gondoskodik az összetett hátsó és elülső pótlásokról. A tapasztalt CEREC felhasználók eszköznek kifinomult eszközeire.





A CEREC CSISZOLÓEGYSÉG - PONTOS, GYORS ÉS CSENDES

A fogászati szék mellett mintaszerű pontossággal elkészített pótlások.

Egyszerűen fogassa be a kerámia tömböt a helyére és nyomja meg a gombot. Az ikerfúrós működési rendszer újra meg újra bizonyított a gyakorlati használatban. A CEREC MC XL és a CEREC 3 csiszolóegység finoman, a lehető legnagyobb pontossággal formálja meg a kerámia blokkot. A csiszolás előtt a szoftver automatikusan ellenőriz és beállít minden eszközt. Mindkét CEREC csiszolóegység bárhol üzembe helyezhető a fogászati rendelő területén - például ott, ahol a páciensek „élőben” láthatják a csiszolási folyamatot.

Válassza ki a tömböt.

Fogassa be a blokkot a helyére.

Indítsa el a csiszolást.



Egyenes út a pontos pótlásokhoz és az elégedett páciensekhez.

CEREC MC XL vagy CEREC 3

Választhat a rendkívüli minőségű CEREC MC XL csiszolóegység és a kicsi, bizonyított és versenyképes árral rendelkező CEREC 3 gép között. Függetlenül attól, hogy melyiket választja, a CEREC-kel időt és türelmet nyer. A könnyen használható CEREC szoftver, az automatizált csiszolás, a teljes kerámia anyagok klinikai támogatottsága, az egyalkalmas kezelés, a páciensek pozitív visszajelzése - ezek alkotják a munkájával való maximális elégedettséget. Ezen felül a CEREC magasabb keresethez is juttatja Önt. A páciensek ajánlásánál nincs biztosabb alap egy sikeres jövőépítéshez.

CEREC - az előnyeiről röviden:

Sebesség:

- A CEREC csiszolóegység az okkluzális felszínt és az alapot egyidejűleg faragja ki, ezzel értékes időt takarítva meg.

- A CEREC MC XL csiszolási sebességét úgy optimalizálták, hogy egyszerre tudjon kezelni kvadránsokat és hidaakat is. Ez a nagyobb sebesség ellensúlyozza azt a plusz időt és munkát, amely a ragasztható kerámia korona mázzal való bevonásához és annak kikristályosodásához szükséges.
- A CEREC MC XL nagyobb megbízhatóságot nyújt. Egy opcionális második motorkészlettel is megrendelhető. Ha az egyik fűrófej elromlik, a gép megállás nélkül tovább végzi a munkáját.

Pontosság:

- Hogy biztosítsa a maximális pontosságot, a CEREC MC XL és a CEREC 3 minden csiszolás előtt ellenőrzi az eszközöket.
- A CEREC MC XL mintaszerű pontosságot szolgáltat $\pm 25 \mu$ értékig.
- A kifinomult csiszolási irányító rendszer biztosítja a kerámia blokk megmunkálásának legfinomabb módját.

Rugalmasság:

- Mindkét csiszolóegységet könnyű üzembe helyezni a rendelőben.

- A CEREC 3 csiszolóegység soros porton, vagy kábel nélkül csatlakozik a CEREC 3 képfelvevő egységhez, vagy a CEREC Chairline-hoz.
- A CEREC MC XL-be egy LAN/WLAN kártya van beépítve és a fogászati rendelő hálózatába csatlakoztatható.
- Mindkét egység kicsi és könnyű beüzemelni bárhol a rendelő területén (csupán egy konnektorra van szükségük).
- A CEREC MC XL rendkívül csendes. A páciensek szeretik nézni a csiszolási folyamatot - és továbbadják a jó benyomásaikat a barátaiknak, ismerőseiknek.

Egyszerűség:

- A CEREC csiszolóegységeket könnyű kezelni.
- A CEREC MC XL további felhasználóbarát tulajdonságokkal bír - például: átlátható menürendszer, a tömb befogatásához nincs szükség szerszámmra és a csiszolókamra színes megvilágítása (a csiszolás aktuális állapotát jelzi).



*Teljesen kompatibilis:
Minden CEREC képfelvevő egység kompatibilis minden CEREC csiszolóegységgel, valamint az inLab és inLab MC XL rendszerrel*



A CEREC MC XL: pontos, gyors és csendes

A CEREC MC XL megemelt sebessége és teljesítménye gyakorlati előnyökkel jár, ha egy kezelés alatt több pótlást, vagy tartós ideiglenes hidat akar elkészíteni. A nagy csiszolási sebesség

lehetővé teszi a hagyományosan ragasztható, lítium-diszilikátból készült üvegkerámiák megmunkálását is



A CEREC 3 csiszolóegység: kicsi, bizonyított és versenyképes ára van. Teljesítmény és sebesség szempontjából a CEREC 3 csiszolóegységet egy-fogas pótlásokhoz igazították. Pontosság szempontjából ez a

megfelelő választás a kötőanyaggal rögzítendő inlay-ek, onlay-ek, részleges és teljes koronák és veneerek elkészítéséhez. A CEREC 3 kis méretei mellett bizonyított teljesítményt nyújt.






A CEREC ANYAGOK - SOKOLDALÚAK ÉS BIOKOMPATIBILISEK

A megfelelő anyag minden csiszoláshoz.

Amikor CEREC pótlást készít, a lehető legjobb anyagok közül válogathat. Földpát kerámiák, üveg kerámiák és jó minőségű polimerek alkotják a fogorvosi szék mellett elkészíthető pótlások anyagkínálatát. Biokompatibilisek, klinikailag tesztelve és tartósak - és segítenek a maradék egészséges fogszövetet megőrizni. Az anyagokat olyan neves gyártók szakvéleménye támogatja, mint a Vita Zahnfabrik, Ivoclar Vivadent, Merz Dental és a Sirona. Körülbelül 20.000 fogorvos helyezte bizalmát a CEREC-be. És több, mint tíz millió páciens elégedett az eredménnyel.

A tökéletes anyagok úgy néznek ki, mintha eredeti zománc lenne rajtuk.

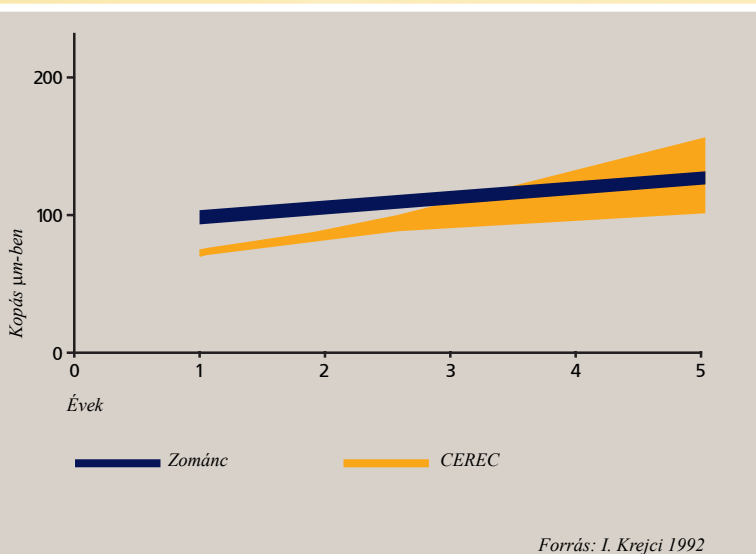

A CEREC kerámiák kimagasló tulajdonságokat kínálnak

Biokompatibilisek és fémmentesek, ezen kívül a már meglévő fémalapú pótlásokkal kombinálhatók. A korrozióból és az inkompatibilitásból származó problémák elvileg kizárhatóak. A restauráció esztétikus kinézete nem befolyásolja az átlátszatlan fém struktúrát. Fogíny irritáció és összehúzódás nem lép fel. Továbbá a kerámia anyagok megfelelnek a törhetetlenség, kopás, esztétika és működőképesség előírásainak. És végül, de nem utolsó sorban kötőanyaggal rögzíthetőek. A kerámia anyagot maradandóan a foghoz illesztik.

Üveg kerámiák koronákhoz

Sok esetben konzervatív megoldás is elfogadható. A kötőanyaggal rögzített kerámia onlay-ek megerősítik az eredeti fogszöveteket: tökéletes választás egy hagyományos PFM koronához. És ha a korona elkerülhetetlen, a CEREC gyorsan és megbízhatóan készít egy erős üveg kerámia pótlást. Ezeket egyetlen kezelés alatt elkészítheti és hagyományosan behelyezheti.

Anyagok ideiglenes előlő koronákhoz

Ideiglenes pótlás magas minőségű implantátumból? Ez gyakran nem a legjobb megoldás. A fogorvosoknak most lehetőségük nyílt előformázott, esztétikusan kialakított, jó minőségű polimer anyagból (IPN) készített koronákat használni. A CEREC rendszer segítségével ezeket a pótlásokat könnyűszerrel az illesztésre, vagy a javítandó felületre helyezheti - meggyőzően esztétikus eredménnyel.

Kompozit anyagok ideiglenes hidakhoz

A CEREC felhasználók szívesen készítenek ideiglenes hidakat, melyek nem csak tartósak, de jól is néznek ki és könnyen kifaraghatják a fogorvosi szék mellett. Az elérhető anyagokat egyénileg állíthatják össze és akár „négy egységes” hidakra is alkalmazhatják.



Forrás: A. Baltzer 2007

	S0-M (0M1C)		
	S1-M (A1C)		
S2-T (1M1C)	S2-M (1M2C)	S2-O (A2C)	S2-PC (1M2C)
S3-T (2M1C)	S3-M (2M2C)	S3-O (A3C)	S3-PC (2M2C)
S4-T (3M1C)	S4-M (3M2C)	S4-O (3M3C)	S4-PC (3M2C)
	S5-M (4M2C)		

Az itt látható árnyalatok elérhetők a valóságtól.

Rövid út az esztétikus eredményhez

A CEREC kerámiaanyagokat gyorsan és könnyen lehet polírozni. Be is vonhatja, vagy helyi réteget is tehet rá (ezeket akár az asszisztensére, vagy a fogtechnikusára is hagyhatja). Mindenesetre a „kaméleon effektus” olyan jól működik, hogy a polírozás általában elegendő az inlay-ekhez és (a legtöbb) onlay-hez.

Átlátszó és természetesen rétegelt

A magas áttetszőségüknek köszönhetően a CEREC pótlások tökéletesen beilleszkednek a szomszédos fogak közé. Elülső és hátsó koronákhoz polikróm tömb is rendelhető. Ezek a blokkok speciálisan rétegelték, hogy hasonlítsanak a természetes fog zománcához, a dentinhez és a fognyakhoz.

CEREC tömbök - az „eredeti” újra fogalmazva

Az új Sirona CEREC tömbök ideálisak a fogászati szék melletti megmunkáláshoz. Klinikailag tesztelt földpát kerámiából készültek, könnyű őket polírozni és teljesen úgy néznek ki, mintha igazi fogzománcuk lenne.

A CEREC tömbök egy különleges tulajdonsága: az új CEREC árnyalat rendszer

Az új CEREC árnyalat rendszer egyesíti a VITA Classic egyszerűségét és a Vita 3D Master változatosságát. A 12 CEREC Blokk hat különböző árnyalatban rendelhető - S0-tól (színtelen) S5-ig (sötét) - és három különböző átlátszóságban (átlátszatlan, közepesen átlátszó, átlátszó). Továbbá három polikróm CEREC PC Blokk rendelhető különböző méretben.



CEREC – ESZTÉTIKA, MELY MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL


Az eredmény megkülönböztethetetlen a természetes fogtól.

Ön és a páciensei tökéletes eredményre számíthatnak. Pontosán személyre szabhatja a szolgáltatásait ügyfelei esztétikai elvárásai és anyagi helyzetéhez mérten - az elégedettség garantált. A CEREC-nek köszönhetően minden lehetőség nyitva marad Ön előtt - úgy mint polírozás, ragasztás, festés, vagy esztétikai finomítások a fogászati laborban.

Helyezze be az elkészült pótlást.

Távolítsa el a felesleges anyagot.

És legyen elégedett a kiváló eredménnyel.

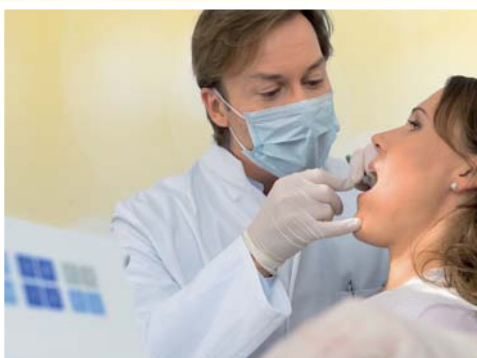

Vonzó és kifinomult kezelési eredmények: A fogorvosoknak és a pácienseknek minden okuk megvan az elégedettségre.



*A kiindulóhelyzet: erős zománc fejlődési hiányosságok, az alsó és felső állkapocs minden fogánál elszíneződés, rendellenességek, és jelentős esztétikai elégtelenség.**

*A premoláris fogak funkcionális megerősítése a CEREC 3 kerámia pótlásokkal, kombinálva a felső és alsó állkapocs elülső fogainak esztétikai helyrehozatalával.**

* Egyetemi professzor: Dr. Gerwin Arnetzl, Graz University, Austria.
CEREC felhasználó 1989 óta



*A kiindulópont: részleges aranykorona a bal felső egyes rágófogon.***

*A fog helyrehozatala után a kötőanyaggal rögzített CEREC részleges korona polírozott felszíne sokkal esztétikusabb látványt nyújt.***

*** Privát fogorvos Dr. med. dent. Andreas Bindl,
Nyugalmazott fogorvos a Fogszínű és Komputerezált
Pótlások Központjában, Zurich Egyetemen.
CEREC felhasználó 1994 óta*



CEREC – KLINIKAI TANULMÁNYOK

Tapasztalat, mely megnöveli bizalmát

Még mindig szkeptikus? A CEREC leírása kétségtől túl jól hangzik, hogy igaz legyen. De épp ellenkezőleg, a CEREC nagyon is valóságos. És hogy bebizonyítsuk, több, mint 250 a CEREC pótlások hatékonyságáról, biokompatibilitásáról és hosszú életéről szóló tudományos tanulmányra hívjuk fel figyelmét.

A páciensei az Ön tapasztalatára bízzák magukat. Ön pedig bízza magát a híres egyetemi professzorok és az elkötelezett gyakorló fogorvosok tapasztalatára.

A CEREC az egyik legbehatóbban megvizsgált fogászati eljárás - mint azt a számos klinikai tanulmány és a sokféle tudományos cikk alátámasztja. A tények magukért beszélnek. 18 év után a CEREC inlay-ek és onlay-ek 84,4%-a ép és működőképes. Azokban az esetekben, amikor az inlay-eket és onlay-eket kötőanyaggal rögzítették, tíz év után a sikerek aránya 90 és 95% között van. Körülbelül 5.000 restauráció ellenőrző vizsgálata kimutatta, hogy a túlélési arányait tekintve a CEREC restaurációk legalább az arany tömással egyenértékűek - és egyértelműen felülmúlja a kompozit töméseket.

A legfontosabb megállapítások röviden:

Tény: Több, mint 20.000 CEREC felhasználó van világszerte.

Tény: Már több, mint 15 millió CEREC pótlást készítettek.

Tény: Tíz év elteltével a CEREC inlay-ek és onlay-ek 90-95%-os túlélési arányt mutatnak.

Tény: Öt év elteltével a CEREC koronák 95-97%-os túlélési arányt mutatnak.

Tény: Kilenc év elteltével a CEREC héjak lenyűgöző, 94%-os túlélési arányt mutatnak.


A tények a CEREC mellett szólnak:

Egy 1.011 inlay-ről és onlay-ről szóló tizennyolc éves tanulmány a következőt írja: „A CEREC restaurációk (beleértve a nagyobbakat is) különösen hosszú életűek. Sok esetben a hiánypótlást célzó restauráció és a gondos ragasztás szolgáltatja az alapot, hogy eltekintsünk a teljes koronáktól.”

Egy a CEREC inlay-eket és az arany pótlásokat összehasonlító tanulmány a következőt írja: „Tartósságát tekintve a CEREC inlay-ek az arany pótlásokkal egyenértékűek. A laborban készített kerámia restaurációk ebből a szempontból rosszabb minőségűek voltak.”

Egy a tartósságról és a termék árakról szóló tanulmány a következőt írja: „A CEREC inlay-ek orvosi és gazdasági szempontból is jobbak minden más inlay típusnál.”

A 250+ CEREC eljárásról szóló klinikai tanulmányról további információkat a www.sirona.com oldalon talál.

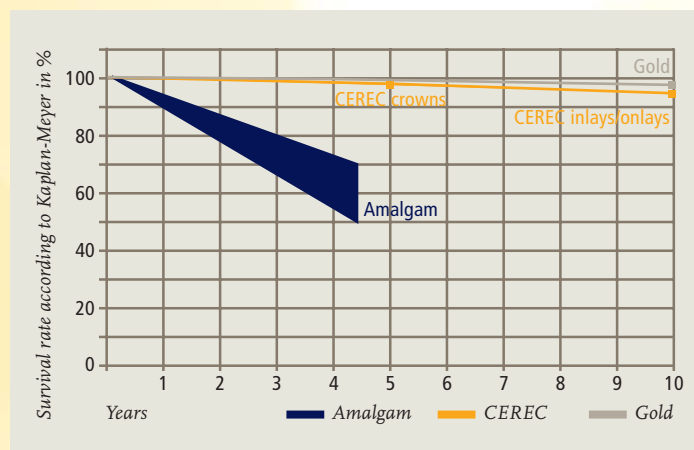





CEREC – EGY ELJÁRÁS, AMI KIFIZETŐDŐ


A CEREC olyan, mint egy befektetés.

Az elkötelezett CEREC felhasználók és a vonatkozó tudományos tanulmányok mind ugyanarra az eredményre jutottak. A páciensek 98%-a a kezelést „nagyon jónak”, vagy „jónak” minősítik. Egyre több páciens akar nagyon jó minőségű pótlást és hajlandóak ezért többet is fizetni - cserébe elvárják az általuk igényelt minőségű szolgáltatást. Ezért megéri egy olyan technológiába befektetni, amely mind az Ön, mint a páciensei igényeit kielégítik.

Egy befektetés, ami megéri

A CEREC-be befektetni kifizetődő. Helyben magas értékű fogászati szolgáltatást tud nyújtani. Minthogy a folyamat legtöbb részét átadhatja másnak, a járulékos idő a minimumra csökken. A CEREC kevesebb, mint 5%-kal emeli az óradíját.

Havonta csupán néhány CEREC restauráció elegendő ahhoz, hogy egyenesbe jöjjön. A páciensek pozitív visszajelzésén felül magasabb keresethez jut, amely biztosítja a fogászati rendelő hosszútávú fennmaradását

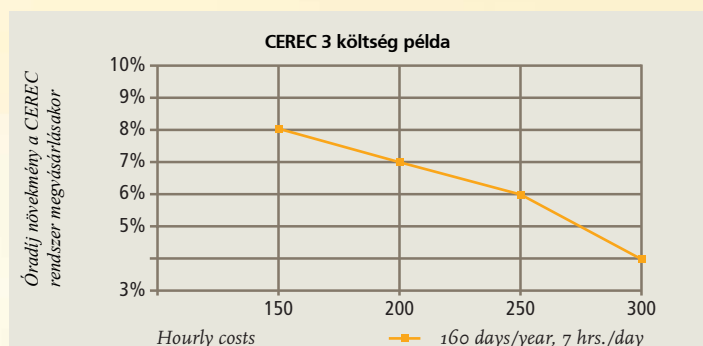



CAD/CAM RENDSZEREK | KÉZIDARABOK | HIGIÉNIAI RENDSZEREK | KEZELŐEGYSÉGEK | RÖNTGEN RENDSZEREK

SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTŐJE A FOGÁSZATBAN

A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM rendszereket a fogászati rendelők (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat és Higiéniai rendszereket, Kezelőegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsmínőségű termékeket állít elő, melyek használata garantáltan egyszerű és messzemenően megtérítik a beléjük fektetett tőkét - előny a praxisnak, segítség a páciensnek. Velünk minden kihívással sikeresen szembenézhet, bízson az általános tapasztalatban, mely szerint: **Nagyszerű nap lesz. A Sironával.**

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:

GlobDent Kft szerviz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác

Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu

GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest

Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu

Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim

Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com

The Dental Company

sirona.